

COVID-19 | Evde Lolipop PCR Havuzu uygulama talimatları

Okullar ve anaokulları segmentinde pandeminin daha iyi kontrol edilebilmesi için, çocuğunuza SARS-CoV-2 ile enfeksiyon testi yapılması önerilmektedir.

Okulda, çocuklar birkaç numunenin bir PCR'de birlikte ölçüldüğü bir ilk testi ("havuz numunesi") zaten gerçekleştirmişlerdir. Havuz testinin pozitif çıkması halinde, sınıftaki çocuklara SARS-CoV-2 bulaşmış demektir. Böyle bir durumda, konuyla ilgili olarak okulunuzdan daha fazla bilgi alacaksınız. Kaydırma kilitli poşeti lütfen sadece o zaman açın ve numune alma işlemini gerçekleştirin. O zamana kadar poşeti lütfen oda sıcaklığında muhafaza edin.

Numune alma işlemini çocuğunuz için güvenli ve keyifli bir hale getirmek amacıyla, evde numune alırken de "Lolipop yöntemi" kullanılmaktadır. Okul tarafından verilen kilitli poşette, çocuğunuza verdiğiniz ve saplı şekerde/lolipopta olduğu gibi 30 saniye ağızda emilen steril bir tampon bulacaksınız. Ardından tamponu birlikte verilen numune torbasına koyun ve SYNLAB laboratuvarına gönderme işleminin yapılacağı okula götürün.

Orada çok hassas bir PCR yöntemi kullanılarak analiz gerçekleştirilir.

Kilitli poşet aşağıdaki malzemeleri içerir:

- a) Numune torbası
- b) Taşıma tüplü tampon
- c) SYNLAB Access uygulaması için okul tarafından basılan bir QR kodu



Hazırlık

1

Numune torbasının üzerindeki etikete çocuğunuzun adını yazın.

Bir barkod varsa ve henüz taşıma tüpüne yapıştırılmamışsa, lütfen bu barkodu uzunlamasına yönde yapıştırın. Tüpün etrafına sarmayın!

SYNLAB Access uygulamasını indirin:

**2****3**

Uygulama içerisinden e-posta adresinizle kaydolun. Daha sonra, ilgili sayfada bilgilerinizi tamamlamanız ve bir şifre seçmeniz için tıklayabileceğiniz bir bağlantıyı içeren bir e-posta alırsınız. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulama içerisinde "Kendi kendine testi başlat" ögesine tıklayın. Şimdi çocuğunuzun ücretsiz takip testini etkinleştirecek olan, okul tarafından sağlanan erişim kodunu girmeniz istenecektir.

Bilgileri girdikten sonra, tampon taşıma tüpünün üzerindeki barkodu tarayın.

4

Numune alma talimatı

5



Taşıma tüpü içerisindeki tamponu kilitli poşetten çıkarın. Tamponu taşıma tüpünden dışarı çekin ve çocuğunuza verin.

Çocuğunuz pamuklu tarafı ağızda olacak şekilde tamponu ağızına alır ve 30 saniye boyunca emer: Bunu yaparken dilini ileri geri hareket ettirmelidir. **Çiğnememelidir!**

Ardından tamponu taşıma tüpüne yerleştirin ve ağızını iyice kapatın.

6



7



Taşıma tüpünü numune torbasına yerleştirin. Yapışkan kilit yardımıyla numune torbasının ağızını kapatın.

Lütfen numuneyi mümkün olan en hızlı şekilde okula getirin!

İade (özellikle teslim süreleri) veya daha sonraki taşıma işlemleri hakkındaki bilgileri okulunuzdan alabilirsiniz.

PCR analizinin sonucu hakkında SYNLAB Access uygulaması üzerinden bilgilendirileceksiniz.

8

